

	ASPIRATÖR TEMİZLİK TALİMATI	Doküman No	AML.TL.17
		Yayın Tarihi	01.07.2009
		Rev. No	00
		Rev. Tarihi	-
		Sayfa No	1/1

Hazırlayan	İnceleyen	Onaylayan
Enfeksiyon Kontrol Komitesi	Kalite Yönetim Direktörü	Başhekim

1. AMAÇ

Aspirasyon işlemleri sonrasında aspirasyon cihazlarının uygun temizliklerinin sağlanarak solunum sistemi enfeksiyonlarının önlenmesi için yöntemlerini tanımlamaktır.

2. KAPSAM

Bu talimat, nazokomiyal solunum sistemi enfeksiyonlarının önlenmesi amacıyla doğru aspiratör uygulama hususlarını, hemşireler ve yardımcı personelleri kapsar

3. TANIMLAR / KISALTMALAR

Özel bir tanım yoktur.

4. UYGULAMA

4.1.Sabit Aspiratörler

4.1.1.Eller işlem öcesi "**Ei Hijyeni Ve Eldiven Kullanım Talimatı**"na uygun olarak yıkanır ve non steril eldiven giyilir.

4.1.2.Vakumu sağlayan ara bağlantı çıkarılır.

4.1.3.Hastanın aspirasyon işlemi bittikten sonra tek kullanımlık olan torbalar haznedden çıkarılır.

4.1.4.Torba "**Atık Yönetim Prosedürü**"ne uygun olarak tıbbi atığa atılır. Eldivenler değiştirilir.

4.1.5.Hazne ve aspiratör sprey yüzey dezenfektanı ile dezenfekte edilir.

4.1.6.Yeni aspiratör torbası takılır. Vakum sağlayan aspiratör ara bağlantısı takılır.

4.1.7.Eldivenler çıkarılır "**Ei Hijyeni Ve Eldiven Kullanım Talimatı**"na uygun olarak eller yıkanır.

4.1.8.Aspiratörler dolmadığı zamanlarda en geç 24-48 saatin sonunda atılır ve dezenfekte edilir.

4.2.Taşınabilir Aspiratörler

4.2.1.Eller işlem öcesi "**Ei Hijyeni Ve Eldiven Kullanım Talimatı**"na uygun olarak yıkanır ve non steril eldiven giyilir.

4.2.2.Aspiratörün iki haznesi arasındaki vakumu sağlayan ara bağlantı çıkarılır

4.2.3.Hastanın aspirasyon işlemi bittikten sonra cam kavanozlar haznedden çıkarılır, boşaltılır.

4.2.4.Eldivenler değiştirilir.

4.2.5.Cam kavanoz suyla çalkalanır.Daha sonra sprey yüzey dezenfektanı veya %5 lik çamaşır suyu ile dezenfekte edilir.Yerine yerleştirilir.

4.2.6.Eldivenler çıkarılır,eller yıkanır.

4.2.7.Aspiratörler dolmadığı zamanlarda en geç 24-48 saatin sonunda dezenfekte edilir.

5. İLGİLİ DÖKÜMANLAR

ENF.TL.02 Ei Hijyeni Ve Eldiven Kullanım Talimatı

ATK.PR.01 Atık Yönetim Prosedürü