

	<b>TIBBİ ATIK ARABASI TEMİZLİK TALİMATI</b>	Döküman No	ATK.TL.03
		Yayın Tarihi	01.07.2009
		Rev. No	01
		Rev. Tarihi	24.07.2019
		Sayfa No	1/1

Hazırlayan	İnceleyen	Onaylayan
Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi	Kalite Yönetim Direktörü	Başhekim

### 1.AMAÇ

Tıbbi atık taşıma arabasının temizliğinin sağlanmasıdır.

### 2.KAPSAM

Tıbbi atık personeli ve Enfeksiyon Kontrol Hemşiresini kapsar.

### 3.TANIMLAR

Özel bir tanımı yoktur.

### 4. UYGULAMA:

4.1 Temizliğe başlamadan önce eldiven giyilir.

4.2 Konteyner içine sıvı sızdırsa, talaş ile yoğunlaştırılıp, kirlenen talaş tıbbi atık torbasına atılır.

4.3 %10'luk DESAMOX ile konteyner dışı ve içi silinir. **Konteyner kesinlikle yıkanmaz.**

4.4 Silinen bez tek kullanımlık ise tıbbi atık torbasına atılır. Tekrar kullanılacaksa %10'luk DESAMOX ile yıkanıp kurumaya bırakılır.

4.5 Konteyner temizlik ve dezenfeksiyonu, görünür bir kirlenme olmasa bile, günde bir defa mutlaka yapılır.

4.6 Eldiven çıkarılıp, el yıkanarak, el hijyeni sağlanır.

### 5.İLGİLİ DÖKÜMAN

İlgili dokümanı yoktur.