

	HASTABAŞI TEST CİHAZI KULLANMA TALİMATI	Doküman No	BIY.TL.11
		Yayın Tarihi	22.10.2012
		Rev. No	02
		Rev. Tarihi	15.12.2015
		Sayfa No	1 / 1

Hazırlayan	İnceleyen	Onaylayan
Laboratuvar Teknikeri	Kalite Yönetim Direktörü	Başhekim

1.AMAÇ

Cihazın amacına uygun ve doğru kullanımını ve bakımını sağlamak, Hastanın kan şekeri seviyesini ölçmek.

2. KAPSAM

Yataklı servisler, ameliyathane, yoğun bakımlar, acil servis ve biyokimya laboratuvarını kapsar.

3.TANIMLAR

Özel bir tanımı yok

4. UYGULAMA:

- 4.1. Cihazın çalışıp çalışmadığı kontrol edilir. Cihaz ve striplerin kod karşılaştırması yapılır.
- 4.2. İşlem öncesi **Ei Hijyeni ve Eldiven Kullanma Talimatı'** na göre eller yıkanır, eldiven giyilir.
- 4.3.Kullanılacak bütün malzemeler (tedavi tepsisi) ile hasta başına gidilir.
- 4.4.Hasta kimlik kontrolü sözlü ve kimlik bilekliğinden kontrol edilir.
- 4.5.Cihaza glukostrip takılır.
- 4.6.Kan alınacak bölgenin alkollü spanç ile temizliği yapılır.
- 4.7.Lanset ile bölge delinir. İlk kan damlası kuru pamuk ile silinir.
- 4.8.Stribe gerektiği kadar kan damlatılır ve cihazın okuması beklenir.
- 4.9.Lanset ile delinen bölge kuru spanç ile kanama zamanı kadar basınç uygulanır.
- 4.10. Çıkan sonuç **Hemşire Takip ve Tedavi Formu'** na kayıt edilir.
- 4.11.Kan şekeri sonucu sistemde onaylanarak, raporu alınır, hasta dosyasına konmak için servise gönderilir.
- 4.12.Cihazın temizliği yapılarak bir sonraki kullanıma hazır bırakılır.
- 4.13.İşlem sonrasında görevli personel **Ei Hijyeni ve Eldiven Kullanma Talimatı'** na olarak ellerini yıkar.

5.İLGİLİ DÖKÜMANLAR

KLN.FR.02 Hemşire Takip ve Tedavi Formu

ENF.TL.02 Ei Hijyeni ve Eldiven Kullanma Talimatı