



OKSİJEN MANOMETRESİ VE OKSİJEN PANELİ TEMİZLİK TALİMATI

Doküman No	KLN.TL.16
Yayın Tarihi	01.07.2009
Rev. No	00
Rev. Tarihi	-
Sayfa No	1/1

Hazırlayan	İnceleyen	Onaylayan
Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi	Kalite Yönetim Direktörü	Başhekim

1.AMAÇ

Özel Çevre Hastanesinde oksijen manometresi temizliğinin doğru, uygun yapılmasını sağlamaktır.

2.KAPSAM

Bu talimat oksijen manometresinin temizliği ile ilgili tüm işlem basamaklarını, hemşireleri kapsar.

3.TANIMLAR

Özel bir tanımı yoktur.

4.UYGULAMA

4.1.KULLANILAN CİHAZ / MALZEMELER

Oksijen Manometresi

4.2.O2 manometresi hasta başında bulunan oksijen sisteminden çıkartılır.

4.3.Manometrenin haznesi açılır, doluysa boşaltılır.

4.4.Haznenin içi ve dışı alet dezenfektanı veya %5'lik çamaşır suyu ile yıkanır.

4.5.Manometrenin gösterge kısımları ve açma kapama vanası alet dezenfektanı ile silinir.

4.6.Manometrenin haznesi distile suyla durulanır. Durulandıktan sonra içerisine 100 ml. Steril distile su konur.

4.7.Hazne tekrar yerine takılır.

4.8.Manometre tekrar hasta başındaki oksijen sistemine monte edilir.

4.9. Her hasta öncesi ve 24 saatte bir oksijen manometreleri temizlenir,üzerine bakım yapılan tarih yapıştırılır.

4.10.Oksijen manometreler aktif kullanılmadıkları zamanlarda manometre haznesinin suyu boşaltılır, hazne boş olarak muhafaza edilir.

4.11.Oksijen paneli her gün sprey alet dezenfektanı ile silinir.

5.İLGİLİ DÖKÜMANLAR

İlgili Doküman yoktur