

Hazırlayan	İnceleyen	Onaylayan
Sterilizasyon Ünitesi Sorumlusu	Kalite Yönetim Direktörü	Başhekim

1.AMAÇ

Endoskopik girişimlerde enfeksiyon riskini önlemek ve endoskopik aletlerin uygun dezenfeksiyon ve sterilizasyon yöntemini belirlemek.

2.KAPSAM

Sterilizasyon Sorumlusu, ameliyathane, endoskopi birimi, sistoskopi biriminde yapılan temizliği endoskopik aletlerin kullanıldığı birimlerin sorumluları, bu birimlerde çalışan görevli personelini kapsar.

3.TANIMLAR/KISALTMALAR

EKK: Enfeksiyon Kontrol Komitesi

4.UYGULAMA**4.1.KULLANILAN CİHAZ/MALZEMELER**

Endoskopi yıkama makinesi

4.2.Hastaya kullanılmış endoskobun hortum yüzeyindeki kaba kir sekresyonlar temiz bir gazlı bez veya kağıt havluyla alındıktan sonra ayrılabilen tüm parçaları sökülür. Steril dokularla temas eden endoskop aksesuarları (biyopsi forsepsleri, temizleme fırçaları vb.) steril edilebilir olmalı ya da tek kullanımlık olmalıdır.

4.3.Endoskop ve parçaları üzerinde organik madde kalmayınca ya da dek akan su altında kimyasallara dayanıklı eviyede yıkanır.

4.4. Hareket edebilen parçaları tüm pozisyonlara getirilir.

4.5. “Dezenfektan Kullanım Planı” na uygun şekilde hazırlanan nötral veya enzimatik solüsyon içine Aletler ağızları açık bir şekilde atılır. Solüsyonun aletlerin tüm yüzeyiyle temas etmesine dikkat edilir.

4.6.Solüsyondan çıkarılan aletler steril distile su ile durulanır

4.7.Endoskop ek parçaları takılmadan kurumayı kolaylaştırmak için basınçlı hava kompresörü ile kurutulur. Dikey pozisyonda ve kontaminasyonu engelleyecek şartlarda saklanır.

4.8. Endoskobun çıkarılabilir aparatlarının plastik kısımları haftalık olarak silicone oil ile yağlanır.

4.9. Kamera kısmının her müdahale öncesi gazlı beze lens clear damlatılarak parlaklığı sağlanır.

4.10.EKK onayı alınmadan başka bir dezenfektan kullanılmamalıdır.

4.11.Endoskopik uygulamaya bağlı bir enfeksiyon gelişirse derhal EKK ne haber verilir.

4.12.Uygulayıcılar, temizleme ve dezenfeksiyon işlemi sırasında; su geçirmez önlük giymeli ve koruyucu gözlük takmalıdır. Ellerini “El Hijyeni ve Eldiven Kullanım Talimatı”na uygun şekilde yıkar ve non-steril eldiven giyer.

4.13.Endoskopi ünitesi çalışanları Hepatit -B aşısı olmalıdır.

4.14. Gastroskopi ve kolonoskopi için uygulanan dezenfeksiyon işlemi ayrı hazırlanmış dezenfeksiyon kabı ve çözültisiyle yapılmalıdır.

5.İLGİLİ DÖKÜMANLAR

ENF.TL.02 El hijyeni ve eldiven kullanım talimatı

ENF.PL.04Dezenfektan Kullanım Planı