

	<b>ENDOSKOPIK ALETLERİN DEZENFEKSİYON / STERİLİZASYON TALİMATI</b>	Doküman No	STE.TL.04
		Yayın Tarihi	01.07.09
		Rev. No	00
		Rev. Tarihi	-
		Sayfa No	1/1

Hazırlayan	İnceleyen	Onaylayan
Ameliyathane Sorumlu Hemşiresi	Kalite Yönetim Direktörü	Başhekim

## 1.AMAÇ

Endoskopik girişimlerde enfeksiyon riskini önlemek ve endoskopik aletlerin uygun dezenfeksiyon ve sterilizasyon yöntemini belirlemek.

## 2.KAPSAM

Ameliyathane, endoskopi birimi, sistoskopi biriminde yapılan temizliği Endoskopik aletlerin kullanıldığı birimlerin sorumluları, bu birimlerde çalışan temizlik personelini, kapsar.

## 3.TANIMLAR

Özel bir tanım veya kısaltma yoktur.

## 4.UYGULAMA

### 4.1.KULLANILAN CİHAZ/MALZEMELER

Endoskopi yıkama makinesi

4.2.Hastaya kullanılmış endoskobun hortum yüzeyindeki kaba kir sekresyonlar temiz bir gazlı bez veya kağıt havluyla alındıktan sonra ayrılabilen tüm parçaları sökülür. Steril dokularla temas eden endoskop aksesuarları(biyopsi forsepsleri, temizleme fırçaları vb.) steril edilebilir olmalı ya da tek kullanımlık olmalıdır.

4.3. Endoskop ve parçaları üzerinde organik madde kalmayınca dek akan su altında yıkanır.

4.4. Hareket edebilen parçaları tüm pozisyonlara getirilir.

4.5. Dezenfektan Kullanım Planı na uygun şekilde hazırlanan nötral veya enzimatik solüsyon içine Aletler ağızları açık bir şekilde atılır. Solüsyonun aletlerin tüm yüzeyiyle temas etmesine dikkat edilir.

4.6.Solüsyondan çıkarılan aletler steril distile su ile durulanır

4.7.Endoskop ek parçaları takılmadan kurumayı kolaylaştırmak için basınçlı hava kompresörü ile kurutulur. dikey pozisyonda ve kontaminasyonu engelleyecek şartlarda saklanır.

4.8. Endoskobun çıkarılabilir aparatlarının plastik kısımları haftalık olarak silicone oil ile yağlanır.

4.9. Kamera kısmının her müdahale öncesi gazlı beze lens clear damlatılarak parlaklığı sağlanır.

4.10.EKK onayı alınmadan başka bir dezenfektan kullanılmamalıdır.

4.11.Endoskopik uygulamaya bağlı bir enfeksiyon gelişirse derhal EKK ne haber verilir.

4.12.Uygulayıcılar El Hijyeni ve Eldiven Kullanım Talimatı'na uygun şekilde ellerini yıkar,non-steril eldiven giyer.ayrıca gerekli hallerde önlük giymeli, gözlük kullanmalıdır.

4.13.Endoskop ünitesi çalışanlarının Hepatit -B aşısı olmalıdır.

4.14. Gastroskopi ve kolonoskopi için uygulanan dezenfeksiyon işlemi ayrı hazırlanmış dezenfeksiyon kabı ve çözültisiyle yapılmalıdır.

## 5.İLGİLİ DÖKÜMANLAR

ENF.TL.02 El hijyeni ve eldiven kullanım talimatı

ENF.PL.04Dezenfektan Kullanım Planı