

	İNKÜBATÖR CİHAZI KULLANMA TALİMATI	Doküman No	TRF.TL.04
		Yayın Tarihi	12.06.2012
		Rev. No	00
		Rev. Tarihi	-
		Sayfa No	1/1

Hazırlayan	İnceleyen	Onaylayan
Laboratuvar Sorumlusu	Kalite Yönetim Direktörü	Başhekim

1.AMAÇ

Kan transfüzyon merkezinde bulunan inkübatör cihazının kullanılması

2. KAPSAM

Kan Transfüzyon Merkezi, Kan Transfüzyon Merkezi Sorumlu Hekimi, Başhemşire, Tıbbi laboratuvar teknikeri

3. TANIMLAR

Özel bir tanım yoktur.

4. UYGULAMA :

- 4.1. Cihazın arka kısmında bulunan açma kapama butonu **ON** konumuna getirilir.
- 4.2. Cihaz sıcaklık göstergesi 37°C' yi gösterdiğinde içerideki termometrede 37°C' yi gösteriyorsa kullanmaya başlanabilir.
- 4.3. Elektrik kesintilerinde veya cihaz yerinden kaldırılacaksa mutlaka açma kapama butonu **OFF** konumuna getirilmelidir.
- 4.4. İnkübatör her biri 16 bölmeli olmak üzere iki kısımdan oluşmaktadır.
- 4.5. İnkübatör sıcaklığı sabittir. Ancak süresi değiştirilebilir.
- 4.6. İnkübatör süresi değiştirilmek istenirse, ön panelde bulunan aşağı ve yukarı ok işaretleri kullanılarak değiştirilebilir.
- 4.7. İnkübatör süresi ve sıcaklığı ön panelde bulunan küçük ekrandan takip edilir.
- 4.8. İnkübatör süresi dolduğunda sesli uyarı verir. Sesli uyarıdan sonra **STOP** düğmesine basılarak uyarı sesi kesilir, kapak açılarak içindeki kaset çıkartılır.

5. İLGİLİ DÖKÜMANLAR

Cihaz kullanım kılavuzu.