

	SANTRİFÜJ CİHAZI KULLANMA TALİMATI	Doküman No	TRF.TL.06
		Yayın Tarihi	01.07.2009
		Rev. No	00
		Rev. Tarihi	-
		Sayfa No	1/1

Hazırlayan	İnceleyen	Onaylayan
Laboratuvar Sorumlusu	Kalite Yönetim Direktörü	Başhekim

1.AMAÇ

Kan transfüzyon merkezinde bulunan santrifüj kullanılması

2. KAPSAM

Kan Transfüzyon Merkezi, Kan Transfüzyon Merkezi Sorumlu Hekimi, Başhemşire, Tıbbi laboratuvar teknikeri

3. TANIMLAR

Özel bir tanım yoktur

4. UYGULAMA

4.1. Cihazın arka kısmında bulunan açma kapama butonu ON kısmına getirilir.

4.2 Cihaz açılır açılmaz kullanılır konuma gelecektir.

4.3. Elektrik kesintilerinde veya cihaz yerinden kaldırılacaksa, mutlaka açma kapama butonu OFF konumuna getirilir.

4.4. Cihazın ön panelinde bulunan küçük ekranda santrifüj süresi takip edilebilir. Santrifüj devri ise OPEN butonuna basılarak takip edilebilir.

4.5. Kasetler santrifüj edilmek istendiğinde, mutlaka kasetler dengeli olacak şekilde karşılıklı yerleştirilmelidir.

4.6. Santrifüj süresi 5 dk'dır. Santrifüj süresi dolup, sesli uyarı verip kapak açılana kadar santrifüj durdurulmamalıdır.

4.7. Santrifüj süresi dolduğunda sesli uyarı verdikten sonra, bir süre kapak açılmaz ise, kapak kendiliğinden otomatik olarak kapanacaktır. Kapağın açılması için STOP düğmesine basılır ve kapak açılır.

5. İLGİLİ DÖKÜMANLAR

Cihaz kullanım kılavuzu.