

	VENTİLATÖR TEMİZLİK TALİMATI	Doküman No	YBH.T.01
		Yayın Tarihi	01.07.2009
		Rev. No	00
		Rev. Tarihi	-
		Sayfa No	1/1

Hazırlayan	İnceleyen	Onaylayan
Ameliyathane Sorumlu Hemşiresi	Kalite Yönetim Direktörü	Başhekim

1. AMAÇ

Ventilasyon işlemi sırasında ve sonrasında ventilasyon cihazlarının uygun temizliklerinin sağlanarak solunum sistemi enfeksiyonlarının önlenmesi için yöntemlerini tanımlamaktır.

2. KAPSAM

Bu talimat, nozokomiyal solunum sistemi enfeksiyonlarının önlenmesi amacıyla doğru ventilasyon uygulama hususlarını, tüm hemşireler ve yardımcı personelleri kapsar.

3. TANIMLAR

Özel bir tanım yoktur.

4. UYGULAMA

4.1.Ventilatörlerin iç temizlik, bakım ve dezenfeksiyon işlemlerinde üretici firma önerileri dikkate alınır.

4.2.Ventilatörlerin dış yüzeyleri, günlük olarak su ve deterjanla temizlenir ve 1/100 çamaşır suyuyla (ekran,panel gibi hassas yüzeyleri,tercihan %70 lik alkol ile) dezenfekte edilir.

4.3.Devreler tek kullanımlık olmalıdır.Tek kullanımlık olmayan devreler,kullanım sonrası sökülür,tek tek yıkanır,kurutulur,paketlenir ve steril edilir.

4.4.Gözle görülür kirlenme ve işlev bozukluğu olmadıkça devreler değiştirilmemelidir.

4.5.Devreler içinde oluşan sıvılar boşaltılarak hastaya gitmesi engellenmelidir.İşleme başlamadan önce eller EI Hijyeni Ve Eldiven Kullanım Talimatı’na uygun şekilde yıkanır ve non steril eldiven giyilir.Sekresyonların çevreye bulaşmaması sağlanmalıdır.

4.6.Nazal oksijen kateter ve maskeleri,fonksiyonu bozulduğunda ya da gözle görünür kontaminasyon saptandığında değiştirilmelidir.

4.7.Sistemdeki tüm nemlendiricilerde steril su kullanılmalı, nemlendirici devrelerindeki sular günlük olarak değiştirilmelidir.

5. İLGİLİ DOKÜMANLAR

ENF.TL.02 EI Hijyeni ve Eldiven Kullanım Talimatı