

	KUVÖZ TEMİZLİK TALİMATI	Doküman No	YDY.TL.15
		Yayın Tarihi	01.08.2009
		Rev. No	00
		Rev. Tarihi	-
		Sayfa No	1 / 1

Hazırlayan	İnceleyen	Onaylayan
Enfeksiyon Kontrol Komitesi	Kalite Yönetim Direktörü	Başhekim

1. AMAÇ

Bu talimatın amacı; Özel Çevre Hastanesi'nde bulunan kuvözlerin temizliğini standartlaştırmaktır.

2. KAPSAM

Bu talimat, kuvöz temizliğindeki işlem basamaklarını, birimde görevli hemşireler ve yardımcı sağlık personelleri kapsar.

3.TANIMLAR

Özel bir tanım yoktur.

4.UYGULAMA

4.1.Kuvözler günlük olarak deterjanlı su ile yeşil bezle temizlenir.Durulanır ve nemli kalmayacak şekilde kurulanır.

4.2.Haftalık olarak bebek, kuvöz dışına alındıktan sonra genel kuvöz temizliği yapılır. **Dezenfektan Kullanım Planı**'nda Dezenfektan sprey kullanılır.

4.3.Kuvözde enfekte bir bebek yatışı oldu ise bebek kuvözden çıktıktan sonra başka bebek alınmadan Dezenfektan sprey ile temizlenir.

4.4.Kuvözün şilte ve yatak bölümü çıkartılır, **Dezenfektan Kullanım Planı**'nda belirtilen dezenfektan ile yeşil bezle silinerek dezenfekte edilir ve nemli kalmayacak şekilde kurulanır.

4.5.Kuvözün ayrılabilen tüm parçaları çıkartılır ve **Dezenfektan Kullanım Planı**'nda belirtilen dezenfektan ile silinerek dezenfekte edilir nemli kalmayacak şekilde kurulanır.

4.6.Genel temizliği yapılan kuvözün yardımcı sağlık personeli tarafından tüm parçaları takılır ve hemşire tarafından kuvöz kontrol edilerek tüm parçalarının eksiksiz olması sağlanır.

4.7.Nemlendiricilere distile su konulur ve 24-48 saatte bir değiştirilir.

4.8.Oksijen monometreleri 24-48 saatte bir değiştirilir.

5.İLGİLİ DÖKÜMANLAR

ENF.PL.04 Dezenfektan Kullanım Planı